


4
ELŐKÉSZÍTÉS
A KANÜL BEHELYEZÉSE ÉS
A RENDSZER FELTÖLTÉSE

Orvos / praktizáló szakember

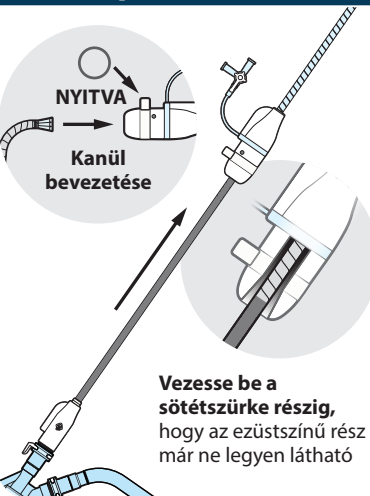


NE tolja ki a tölcserít a hüvelyből, amíg a feltöltés be nem fejeződött.

FIGYELEM: Ha a tölcserít a feltöltés előtt kitolják a hüvelyből, levegő kerülhet a hüvelybe, és ez veszélyeztetheti a beteget. Tartsa a tölcserít a hüvelyen belül, amíg a feltöltés be nem fejeződik.


Illessze be a kanült a hüvelybe

- Ellenőrizze vagy nyissa ki a szelepkart.
- Tartsa a hüvelyt egy tromboembóliától mentes területen az eltávolításhoz.
- Helyezze be a kanült a hüvelybe a sötétszürke részig, hogy az ezüstsínű rész már ne legyen látható.
- Húzza meg a fogantyú triggerét egyszer a 10 cm3-es beállításnál, hogy kiürítse a kanül bevezetése során esetlegesen bejutott levegőt.

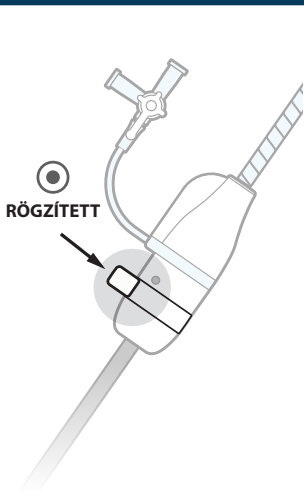


Rögzítse a kanült

- Forgassa a szelepkart a rögzítési pozícióba a kanül rögzítéséhez.

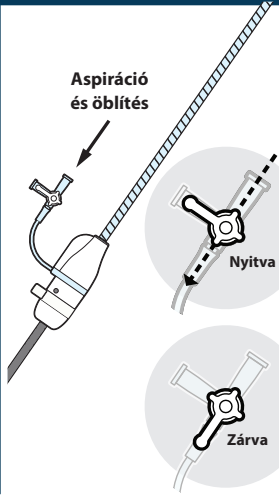

Aspirálja és öblítse át a hüvely zárócsapját

- Aspirálja a levegőt a zárócsapból, majd öblítse át és zárja le a zárócsapot.

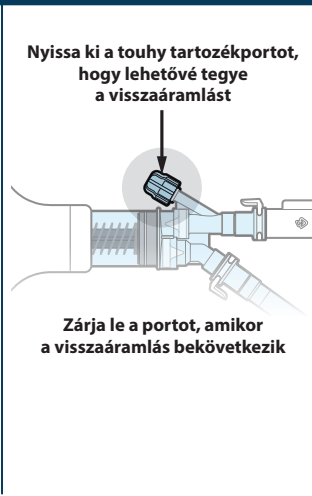

Nyissa/zárja a Touhy portot a visszaáramláshoz

- Nyissa meg a touhy tartozékportot.
- Engedje, hogy végbemenjen a visszaáramlás a porton keresztül.
- Zárja le a portot.

Az AlphaVac rendszer fel van töltve és készen áll a működésre, ha:

ELLENŐRIZZE ÉS BIZTOSÍTSA A KÖVETKEZŐKET


- A kanül be van helyezve a hüvelybe a sötétszürke részig.
- A szelepkar rögzített állapotban van.
- A zárócsapot aspirálták, átöblítették és lezárták.
- Visszaáramlást hajtottak végre a Touhy tartozékporton keresztül.
- A Touhy tartozékport zárva van.

Az AlphaVac rendszer működésre kész




5
MŰKÖDTETÉS
TROMBOEMBÓLIÁK ELTÁVOLÍTÁSA

Orvos / praktizáló szakember

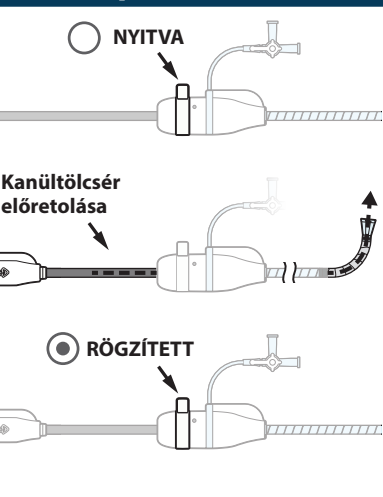


Tolja előre a tölcserít

- Nyissa ki a szelepkart.
- Tolja előre a kanültölcserít.
- Forgassa a szelepkart a rögzítési pozícióba a kanül rögzítéséhez.

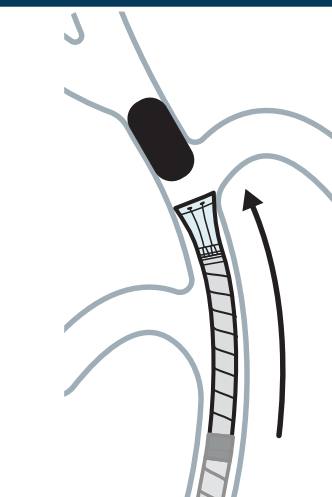


Navigáljon a tromboembóliához, majd fogja be

- Navigáljon a tromboembóliához.
- Kézzel húzza meg a fogantyú triggerét szükség szerint, szabályozott mozdulatokkal, hogy fokozatosan be tudja fogni a tromboembóliát.

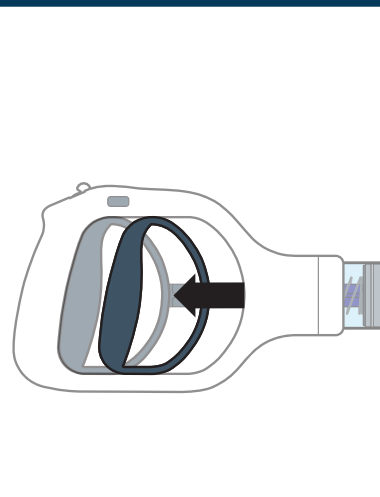

Ha a tromboembóliát befogták

- Folytassa a manuális pumpálást 10 cm3-es (ml-es) vagy 30 cm3-es (ml-es) beállítással.
- Vagy használja a vákuumzárát (lásd a következő képet).

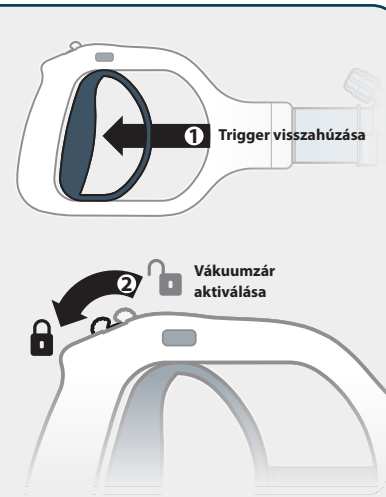


A vákuumzár használata (Csak akkor használja, ha a kanül elzáródott)

- A tromboembóliát be kell fogni.
- Használja a 30 cm3-es (ml-es) beállítást, és aktiválja a vákuumzárát.
- Továbbra is kísérje figyelemmel az eljárást.

- **FIGYELEM:** A Touhy tartozékport vákuum alatt történő kinyitása levegőt juttathat a rendszerbe, és veszélyeztetheti a beteget. Óvatosan járjon el a Touhy tartozékport kinyitásakor, hogy elkerülje a levegő bejutását a rendszerbe.

6
MŰKÖDTETÉS
A RENDSZER ELTÁVOLÍTÁSA A BETEGBŐL

Orvos / praktizáló szakember

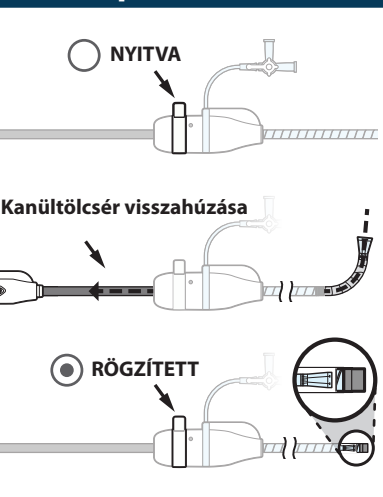

Húzza vissza a tölcserít

- Nyissa ki a szelepkart.
- Húzza vissza a kanült, hogy a tölcser teljesen visszahúzódjon a hüvelybe.
- Forgassa a szelepkart a rögzítési pozícióba a kanül rögzítéséhez.



Távolítsa el a rendszert

- Tartsa a fogantyút a kanülhöz rögzítve, amikor eltávolítja a rendszert a páciensből.

FIGYELEM: Eltávolításakor **NE** válassza le a fogantyút a kanülről. Ha tromboembólia van a kanülben, az a vér kanülon keresztüli visszaáramlásához és a tromboembólia szervezetbe való visszajutásához vezethet.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

RÖVID REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

ifu.angiodynamics.com

19903659-06 Rev A 03/2025

Az AngioDynamics és az AngioDynamics logó, az AlphaVac és az AlphaVac logó az AngioDynamics, Inc., illetve társult vállalatának vagy leányvállalatának védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

© 2025 AngioDynamics, Inc. vagy társult vállalatai. Minden jog fenntartva.



AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP
AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797



RÖVID REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

- 1 ELŐKÉSZÍTÉS
OBTURÁTOR ÉS HÜVELY SZERELVÉNY
- 2 ELŐKÉSZÍTÉS
A HÜVELY ELHELYEZÉSE A BETEGBEN
- 3 ELŐKÉSZÍTÉS
A FOGANTYÚSZERELVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE
- 4 ELŐKÉSZÍTÉS
A KANÜL BEHELYEZÉSE ÉS A RENDSZER FELTÖLTÉSE
- 5 MŰKÖDTETÉS
TROMBOEMBÓLIÁK ELTÁVOLÍTÁSA
- 6 MŰKÖDTETÉS
A RENDSZER ELTÁVOLÍTÁSA A BETEGBŐL

FONTOS: A termék használata előtt olvassa el a termékhez mellékel utasítást a teljes körű javallatok, utasítások, figyelmeztetések, óvintézkedések, lehetséges nemkívánatos hatások és ellenjavallatok tekintetében.