


OBTURÁTOR




KANYLA




POUZDRO

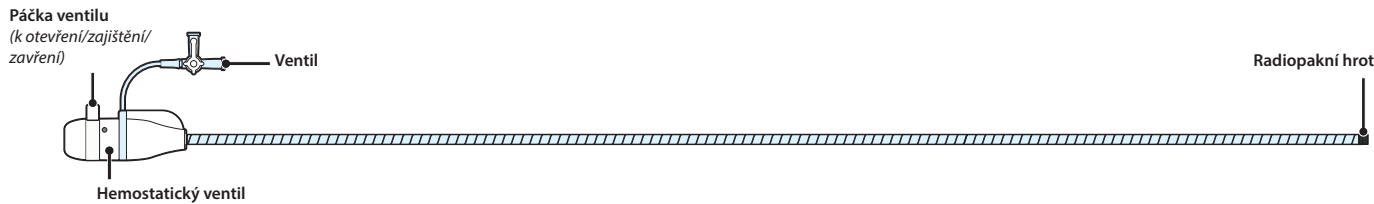



RUKOJEŤ

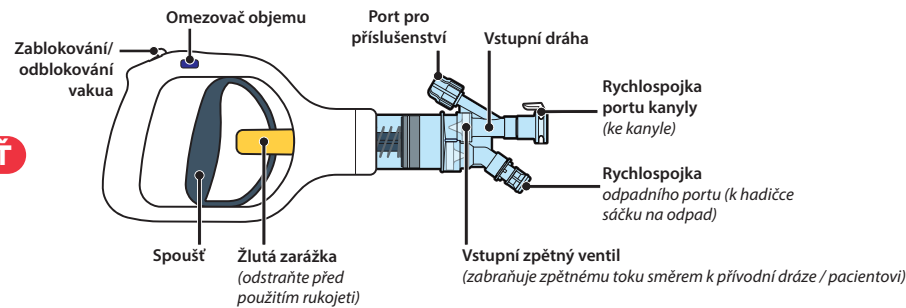

HADIČKA SÁČKU NA ODPAD

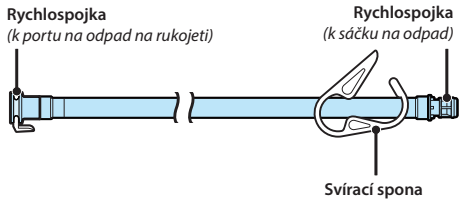


SÁČEK NA ODPAD

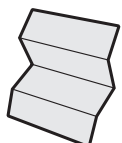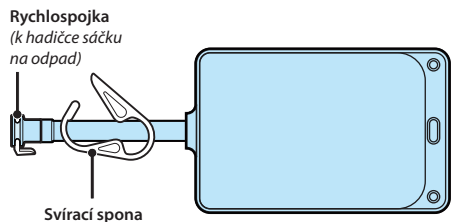


AlphaVac QRG
(Zcela rozložte a projděte
obě strany)

Nastavení/Přípravář

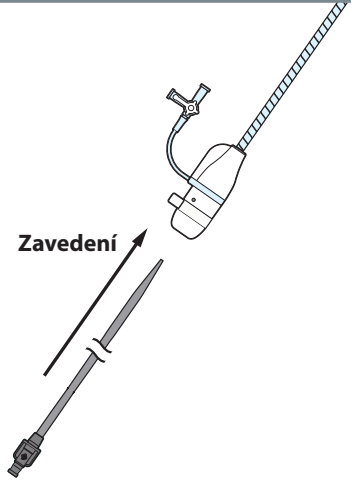


Obturátor zaveďte do pouzdra.

- Obturátor zcela zaveďte do pouzdra.

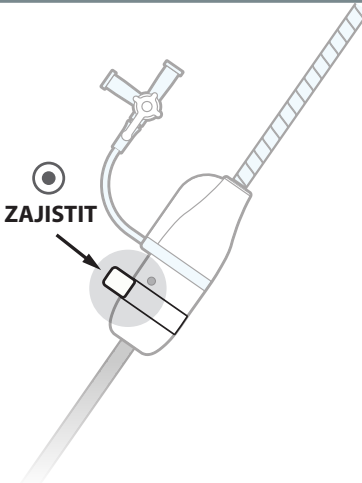

Zajistěte páčku ventilu

- Otočením páčky ventilu do polohy Secure (Zajistit) zajistěte obturátor.

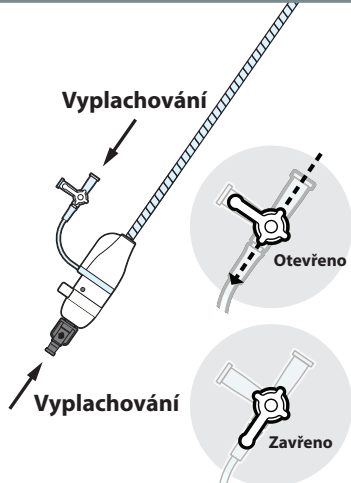

Vypláchněte lumen vodicího drátu a ventil

- Vypláchněte lumen vodicího drátu.
- Vypláchněte a zavřete ventil na pouzdře.

Sestava obturátoru a pouzdra je připravena k zavedení do pacienta, když:

ZKONTROLOVAT A ZAJISTIT


- Obturátor je zaveden do pouzdra.
- Páčka ventilu je zajištěna.
- Lumen vodicího drátu a ventil jsou propláchnuty.
- Ventil je zavřený.

Připraveno pro lékaře k zavedení do pacienta




Zkontrolujte před předáním →

Lékař

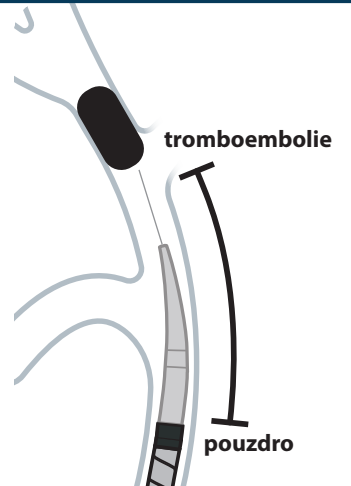


Zaveďte a umístěte pouzdro do pacienta

- Zaveďte pouzdro/obturátor.
- Umístěte hrot pouzdra do oblasti bez tromboembolie za účelem odsátí (tato poloha umožňuje roztažení trychtýře před odsátím).

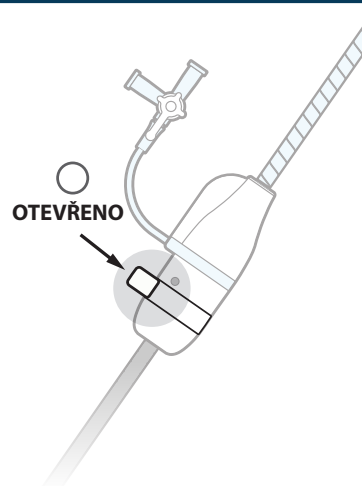

Otevřete páčku ventilu

- Otevřete páčku ventilu.

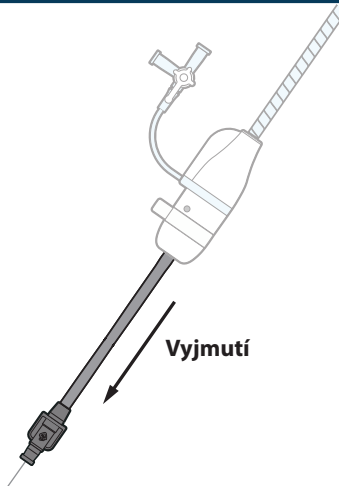

Vyměňte obturátor a vodicí drát nebo pouze obturátor

- Ponechte pouzdro na místě, vyměňte obturátor a vodicí drát nebo pouze obturátor. Pouzdro by mělo zůstat v pacientovi.
- Pokud vodicí drát zůstává v pacientovi, otočte páčku ventilu do polohy Closed (Zavřeno). Pokud je vodicí drát vyjmutý s obturátorem, hemostatický ventil zachová zastavení oběhu krve.

Pouzdro je připraveno na zavedení kanyly a rukojeti, když:


ZKONTROLOVAT A ZAJISTIT

- Pouzdro je umístěno mimo tromboembolii.
- Obturátor a vodicí drát nebo pouze obturátor jsou vyjmuty z pouzdra.

Pouzdro je připraveno na zavedení kanyly a rukojeti




Nastavení/Přípravář

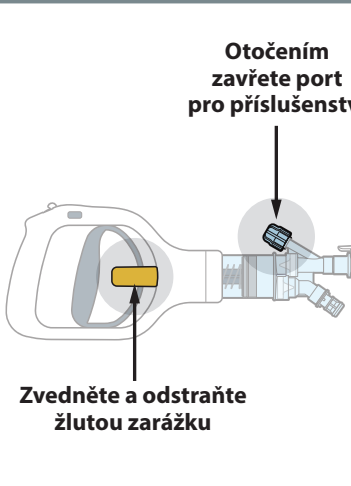

Zavřete port a odstraňte žlutou záračku

- Zavřete port pro příslušenství.
- Zvedněte a odstraňte žlutou záračku.

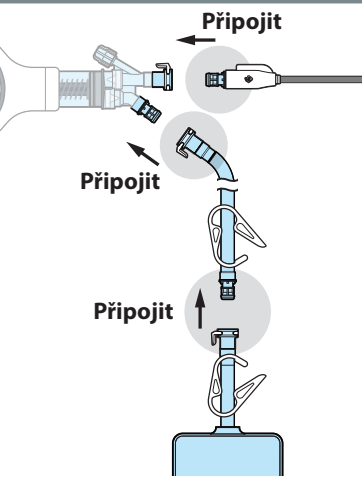

Připojte kanylu, hadičku na odpad a sáček

- Připojte kanylu k rukojeti.
- Připojte hadičku na odpad k rukojeti.
- Připojte sáček na odpad k hadičce.

Příprava sestavy rukojeti

- Umístěte nálevkovitý konec kanyly do misky se sterilním fyziologickým roztokem.
- Při nastavení 30 cm³ třikrát plně stiskněte spoušť rukojeti, abyste systém naplnili.
- Odpojte a vyprázdněte sáček na odpad s plnicím roztokem a vzduchem a poté sáček na odpad znovu připojte.

Sestava rukojeti AlphaVac je připravená pro lékaře, když:


ZKONTROLOVAT A ZAJISTIT

- Port pro příslušenství je uzavřen.
- Žlutá záračka je odstraněna.
- Sestava rukojeti je naplněná.
- Kanyla, hadička sáčku na odpad a sáček na odpad jsou připojeny k rukojeti.

Sestava rukojeti je připravená pro lékaře



Zkontrolujte před předáním →

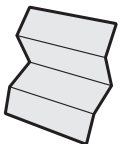

Zcela rozložte a projděte
obě strany

4
PŘÍPRAVA
ZAVEDENÍ KANYLY
A PROČISTĚNÍ SYSTÉMU

Lékař

OTEVŘENO
Zavedení Kanyly

Zavedení provedte až po tmavě šedou část, aby již stříbrná část nebyla viditelná

NEVYSOUVEJTE trychtýř z pouzdra, dokud nebude dokončeno pročištění.

UPOZORNĚNÍ: Vysunutím trychtýře z pouzdra před dokončením pročištění může vniknout vzduch a může dojít k ohrožení pacienta. Ponechte trychtýř uvnitř pouzdra až do dokončení pročištění.

Zavedte kanylu do pouzdra

- Zkontrolujte nebo otevřete páčku ventilu.
- Ponechte pouzdro v oblasti mimo tromboembolii za účelem odsátí.
- Zaveďte kanylu do pouzdra až po tmavě šedou část, aby již stříbrná část nebyla viditelná.
- Při nastavení 10 cm3 jednou stiskněte spoušť rukojeti, abyste vyprázdnili případný vzduch zavedený během zavádění kanyly.

ZAJISTIT

Zajistěte kanylu

- Otočte páčku ventilu do polohy Secure (Zajistit), abyste zajistili kanylu.

Odsajte a vypláchněte ventil pouzdra

- Odsajte vzduch z ventilu a poté ventil vypláchněte a zavřete.

Otevřete port pro příslušenství k provedení zpětného odvodu

Otevřete/ zavřete port pro příslušenství ke zpětnému odvodu

- Otevřete port pro příslušenství.
- Proveďte zpětné odvodu přes port.
- Zavřete port.

Systém AlphaVac je vyčištěn a připraven na zákrok, když:

ZKONTROLOVAT A ZAJISTIT

- Kanyla je zavedena do pouzdra až po tmavě šedou část.
- Páčka ventilu je zajištěna.
- Ventil byl odsátý, vypláchnutý a uzavřený.
- Bylo provedeno zpětné odvodu přes port pro příslušenství.
- Port pro příslušenství je uzavřen.

Systém AlphaVac je připraven na zákrok

5
OBSLUHA
ODSTRANĚNÍ TROMBOEMBOLIE

Lékař

OTEVŘENO

Vysuňte trychtýř kanyly

ZAJISTIT

Vysuňte trychtýř

- Otevřete páčku ventilu.
- Vysuňte trychtýř kanyly.
- Otočte páčku ventilu do polohy Secure (Zajistit), abyste zajistili kanylu.

Přiblížte se až k tromboembolii

- Přiblížte se k tromboembolii.
- Ručně zatáhněte za spoušť rukojeti podle potřeby a pomocí řízeného pohybu postupně odsávejte tromboembolii.

Když je tromboembolie odsávána

- Pokračujte v ručním odčerpávání s nastavením na 10 cm3 (ml) nebo 30 cm3 (ml).
- nebo použijte zámek vakua (viz další obrázek).

Použití zámku vakua (Použijte pouze při zablokování kanyly)

- Tromboembolie musí být odsáta.
- Použijte nastavení na 30 cm3 (ml) a aktivujte zámek vakua.
- Pokračujte ve sledování postupu.

1 Zatáhněte spoušť zpět

2 Aktivujte zámek vakua

• **UPOZORNĚNÍ:** Otevřením portu pro příslušenství během podtlaku může dojít k vniknutí vzduchu do systému a ohrožení pacienta. Při otevírání otvoru pro příslušenství dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili vniknutí vzduchu do systému.

6
OBSLUHA
VYJMUTÍ SYSTÉMU Z PACIENTA

Lékař

OTEVŘENO

Zasuňte trychtýř kanyly

ZAJISTIT

Zasuňte trychtýř

- Otevřete páčku ventilu.
- Zatáhněte kanylu zpět tak, aby byl trychtýř zcela zasunut uvnitř pouzdra.
- Otočte páčku ventilu do polohy Secure (Zajistit), abyste zajistili kanylu.

Vyjměte systém

- Při vyjímání systému z pacienta nechejte rukojet' připevněnou ke kanyle.

UPOZORNĚNÍ: Při vyjímání **NEODPOJUJTE** rukojet' od kanyly. Pokud je v kanyle tromboembolie, mohlo by to vést ke zpětnému toku krve kanylou a opětovnému zanesení tromboembolie.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

STRUČNÝ NÁVOD

ifu.angiodynamics.com

19903659-07 Rev A 03/2025

AngioDynamics a logo AngioDynamics, AlphaVac a logo AlphaVac jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti AngioDynamics, Inc., její pobočky nebo dceřiné společnosti.

© 2025 AngioDynamics, Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP

AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

- PŘÍPRAVA**
SESTAVA OBTURÁTORU A POUZDRA
- PŘÍPRAVA**
ZAVEDENÍ POUZDRA DO PACIENTA
- PŘÍPRAVA**
PŘÍPRAVA SESTAVY RUKOJETI
- PŘÍPRAVA**
ZAVEDENÍ KANYLY A PROČISTĚNÍ SYSTÉMU
- OBSLUHA**
ODSTRANĚNÍ TROMBOEMBOLIE
- OBSLUHA**
VYJMUTÍ SYSTÉMU Z PACIENTA

DŮLEŽITÉ: Před použitím přípravku si přečtěte návod k použití, který je přiložen k přípravku, kde jsou uvedeny všechny indikace, pokyny, upozornění, opatření, možné nežádoucí účinky a kontraindikace.