

ОБТУРАТОР



Лумен на водача

КАНЮЛА




Бързо свързване (към дръжката на порта на каниюлата)

Разбивка на цветовете – тъмносиво/сребристо

85° фуния за каниюла

ДЕЗИЛЕ

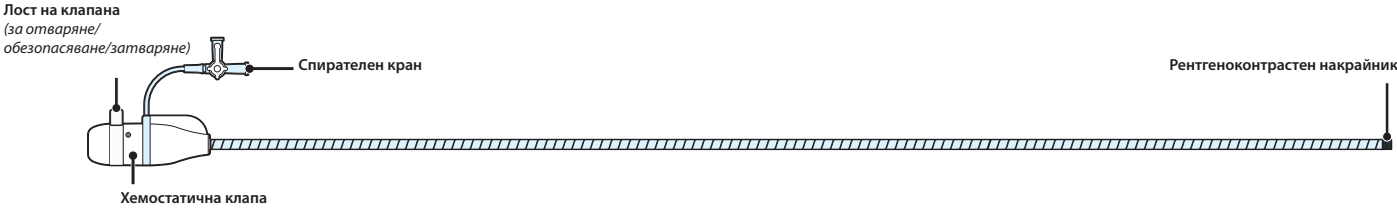


Лост на клапана (за отваряне/обезопасяване/затваряне)

Спирателен кран

Хемостатична клапа

Рентгеноконтрастен накрайник

ДРЪЖКА

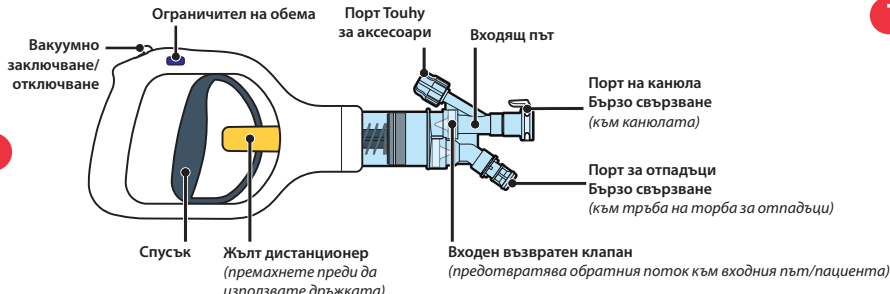

Вакуумно заключване/отключване

Ограничител на обема

Порт Touhy за аксесоари

Входящ път

Порт на каниюла Бързо свързване (към каниюлата)


Порт за отпадъци Бързо свързване (към тръба на торба за отпадъци)

Спусък

Жълт дистанционер (премахнете преди да използвате дръжката)

Входен възвратен клапан (предотвратява обратния поток към входния път/пациента)

ТРЪБА НА ТОРБА ЗА ОТПАДЪЦИ

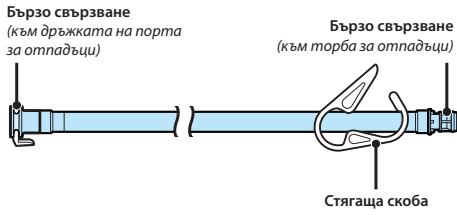


Бързо свързване (към дръжката на порта за отпадъци)

Бързо свързване (към торба за отпадъци)


Стягаща скоба

ТОРБА ЗА ОТПАДЪЦИ

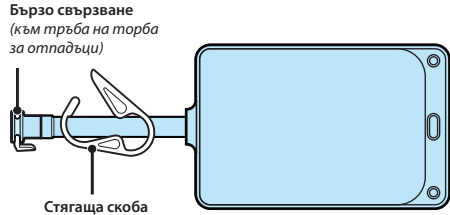

Бързо свързване (към тръба на торба за отпадъци)

Стягаща скоба

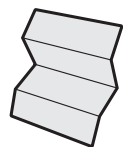

AlphaVac QRG
(Разгънете напълно и прегледайте двете страни)

ПОДГОТОВКА 1 ОБТУРАТОР И ДЕЗИЛЕ


Настройка/Подготовка



Вмъкване

Вмъкнете ОБТУРАТОРА в дезилето


- Поставете напълно обтуратора в дезилето.

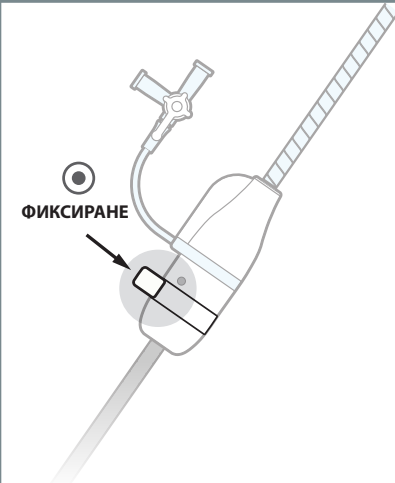

ФИКСИРАНЕ

Фиксирайте лоста на клапана

- Завъртете лоста на клапана в позиция Сигурно, за да фиксирате обтуратора.

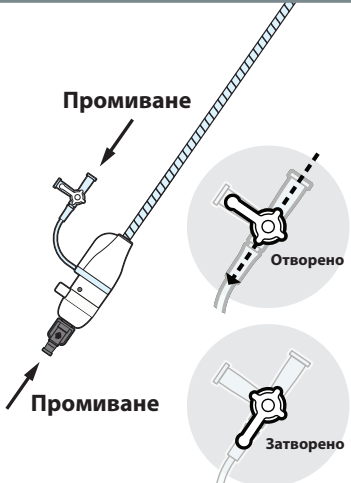

Промиване

Промиване



Отворено

Затворено

Промийте лумена на водача и спирателния кран

- Промийте лумена на водача.
- Промийте и затворете спирателния кран на дезилето.

Комплектът дезиле и обтуратор е готов за поставяне в пациента, когато:

ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ

- Обтураторът се вкарва в дезилето.
- Лостът на клапана е закрепен.
- Луменът на водача и спирателният кран се промиват.
- Спирателният кран е затворен.


Готов за поставяне от лекаря в пациента.



Проверете предварително →

ПОДГОТОВКА 2 ПОСТАВЯНЕ НА ДЕЗИЛЕ В ПАЦИЕНТА

Лекар/практикуващ

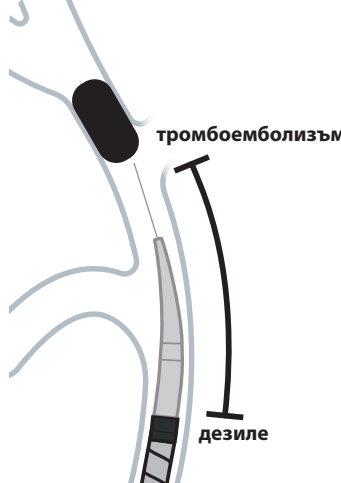


тромбоемболизъм

дезиле

Въведете и поставете дезилето в пациента


- Въведете дезилето/обтуратора.
- Поставете върха на дезилето в зона без тромбоемболи за екстракция (тази позиция позволява разширяване на фунията преди аспирация).

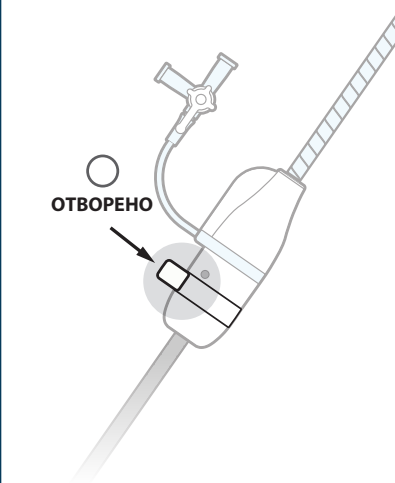

ОТВОРЕНО

Отворете лоста на клапана

- Отворете лоста на клапана.

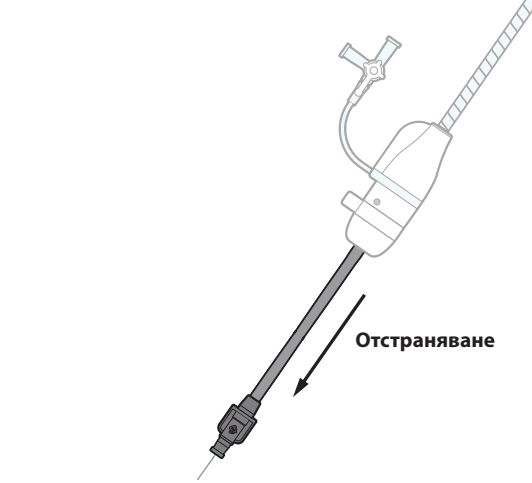

Отстраняване

Отстранете и обтуратора и водача или само обтуратора

- Докато държите обтуратора на място, отстранете както обтуратора, така и водача или само обтуратора. Дезилето трябва да остане в пациента.
- Ако водачът остане в пациента, завъртете лоста на клапана в затворена позиция. Ако водачът се отстрани с обтуратора, хемостатичната клапа ще поддържа стаза на кръвта.

Дезилето е готово за приемане на каниюлата и дръжката, когато:

ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ


- Дезилето е разположено далеч от тромбоемболиите.
- Обтураторът и водачът или само обтураторът се отстраняват от дезилето.

Дезилето е готово за приемане на каниюлата и дръжката



ПОДГОТОВКА 3 ПОДГОТОВКА НА СГЛОБКАТА НА ДРЪЖКАТА

Настройка/Подготовка

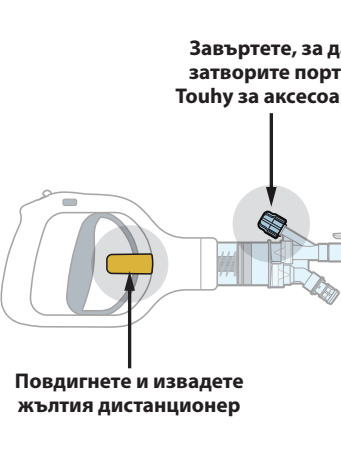


Завъртете, за да затворите порта Touhy за аксесоари

Повдигнете и извадете жълтия дистанционер

Затворете Touhy и отстранете жълтия дистанционер

- Затворете порта Touhy за аксесоари.
- Повдигнете и отстранете жълтия дистанционер.

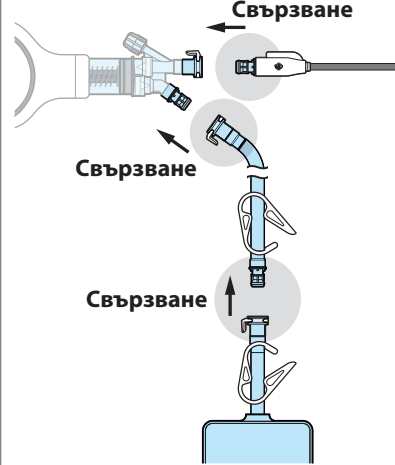

Свързване

Свързване

Свързване

Свържете каниюлата, тръбата за отпадъци и торбата

- Свържете каниюлата към дръжката.
- Свържете тръбата за отпадъци към дръжката.
- Свържете торбата за отпадъци към тръбата.

Заредете модула на дръжката

- Поставете края на фунията на каниюлата в купа със стерилен физиологичен разтвор.
- Задействайте докрай спусъка на ръкохватката три пъти в настройка 30 cc, за да заредите системата.
- Изключете и изпразнете торбата за отпадъци от зареждащия разтвор и въздуха и след това свържете отново торбата за отпадъци.

Комплектът дръжка AlphaVac е готов за лекаря, когато:


ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ

- Портът Touhy за аксесоари е затворен.
- Жълтият дистанционер е премахнат.
- Дръжката е заредена.
- Каниюлата, тръбата на торбата за отпадъци и торбата за отпадъци са свързани към дръжката.

Комплектът дръжка е готов за лекаря



Проверете предварително →

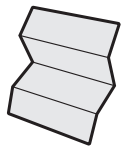

Разгънете напълно и прегледайте двете страни

ПОДГОТОВКА

4



ВМЪКВАНЕ НА КАНОЛА И СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Лекар/практикуващ



НЕ разтягайте фунията извън дезилето, докато не завърши зареждането.

ВНИМАНИЕ: Удължаването на фунията извън дезилето преди зареждане може да вкара въздух и да застраши пациента. Дръжте фунията вътре в дезилето, докато зареждането завърши.

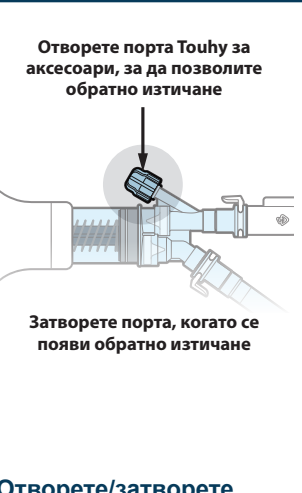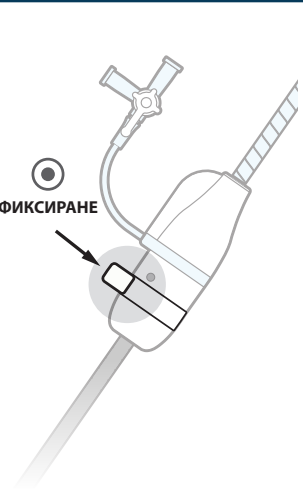

Вмъкнете канюлата в дезилето

- Проверете или отворете лоста на клапана.
- Оставете дезилето в зона без тромбоемболии за екстракция.
- Поставете канюлата в дезилето до тъмносивата част и докато сребрият част вече не се вижда.
- Дръпнете спуска на дръжката веднъж при настройка от 10cc, за да изкарате всеки въздух, вкаран по време на поставяне на канюла.

Фиксиране на канюлата

- Завъртете лоста на клапана в позиция Сигурно, за да фиксирате канюлата.

Аспирация и промиване на спирателния кран на дезилето

- Аспирирайте въздух от спирателния кран, след това промийте и затворете спирателния кран.

Отворете/затворете порта Touhy Port за обратно изтичане

- Отворете порта Touhy за аксесоари.
- Дайте възможност за обратно изтичане през порта.
- Затворете порта.

Системата AlphaVac е заредена и готова за работа, когато:

ПРОВЕРЕТЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ

- Канюлата се вкарва в дезилето до тъмносивата част.
- Лостът на клапана е закрепен.
- Спирателният кран е аспириран, промит и затворен.
- Извършено е обратно изтичане през порта Touhy за аксесоари.
- Портът Touhy за аксесоари е затворен.

Системата AlphaVac е готова за работа




РАБОТА

5


ПРЕМАХВАНЕ НА ТРОМБОЕМБОЛИЯ

Лекар/практикуващ

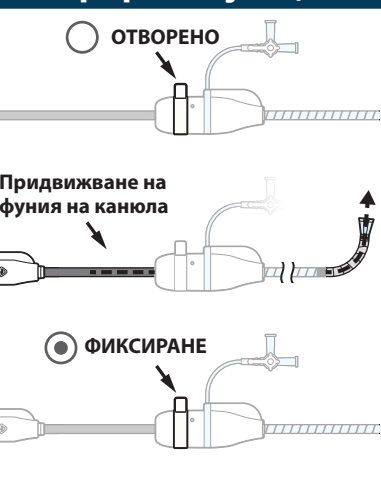


Придвижване на фуния

- Отворете лоста на клапана.
- Придвигнете фунията на канюлата.
- Завъртете лоста на клапана в позиция Сигурно, за да фиксирате канюлата.

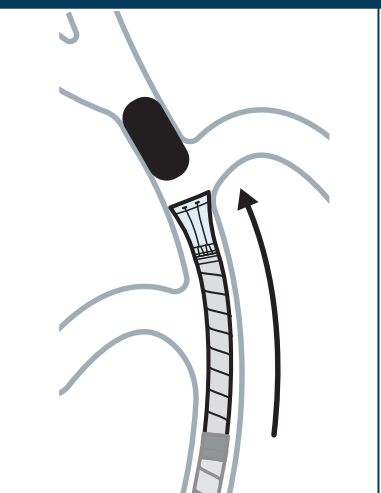

Придвижване до и задействане на тромбоемболизъм

- Придвигнете се до тромбоемболизма.
- Ръчно дръпнете спуска на дръжката, ако е необходимо, като използвате контролирано движение, за да задеситвате постепенно тромбоемболиите.

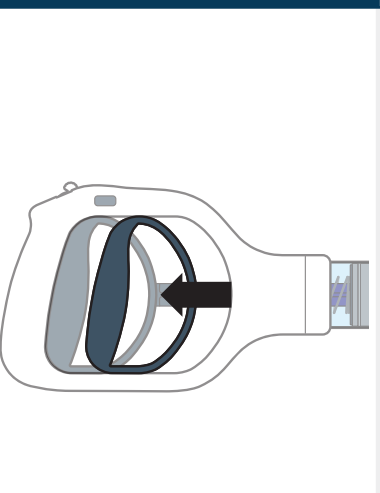

Когато е задействана тромбоемболия

- Продължете ръчно да изпомпвате, като използвате настройка на 10 cc (mL) или 30 cc (mL),
- или използвайте Вакуумно заключване (вижте следващото изображение).



Използване на вакуумно заключване

(Използвайте само когато канюлата е запушена)

- Тромбоемболиите трябва да бъдат активирани.
- Използвайте 30 cc (mL) настройка и да активира вакуумна блокировка.
- Продължете да наблюдавате процедурата.


ВНИМАНИЕ: Отварянето на порта Touhy за аксесоари по време на вакуум може да вкара въздух в системата и да застраши пациента. Бъдете внимателни, когато отваряте порта Touhy за аксесоари, за да избегнете вкарването на въздух в системата.

РАБОТА

6

ПРЕМАХВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПАЦИЕНТА

Лекар/практикуващ

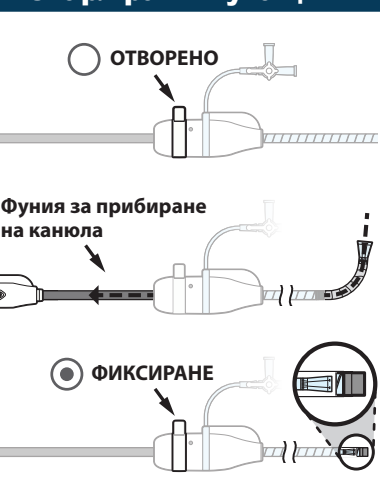

Фуния за прибиране

- Отворете лоста на клапана.
- Издърпайте канюлата назад, така че фунията да се прибере напълно в дезилето.
- Завъртете лоста на клапана в позиция Сигурно, за да фиксирате канюлата.

Отстраняване на системата

- Дръжте дръжката прикрепена към канюлата, когато отстранявате системата от пациента.

ВНИМАНИЕ: При отстраняване **НЕ** разкачвайте дръжката от канюлата. Ако има тромбоембол в канюлата, това може да доведе до обратен поток на кръвта през канюлата и повторно въвеждане на тромбоембола.

ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

**РЪКОВОДСТВО
ЗА БЪРЗА
СПРАВКА**

ifu.angiodynamics.com

19903659-31 Rev A 03/2025

AngioDynamics и логото на AngioDynamics, AlphaVac и логото на AlphaVac са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на AngioDynamics, Inc., филиал или подразделение.

© 2025 г. AngioDynamics, Inc. или неговите филиали. Всички права запазени.

angiodynamics

AngioDynamics, Inc.
603 Queensbury Avenue
Queensbury, NY 12804 USA
USA Customer Service
800-772-6446

EC REP
AngioDynamics
Netherlands BV
Haaksbergweg 75
1101 BR, Amsterdam
The Netherlands

CE 2797

ifu.angiodynamics.com



ALPHAVAC
MULTIPURPOSE MECHANICAL ASPIRATION
F18⁸⁵

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА СПРАВКА

ВАЖНО: Вижте указанията за употреба, предоставени с продукта, за пълни указания, инструкции, предупреждения, предпазни мерки, възможни неблагоприятни ефекти и противопоказания преди употреба на продукта.